

Wichtige Informationen zur Einsendung Ihres medizinischen Befundes



Anleitung

- Sobald die betroffene Trockenblutkarte getrocknet ist (3–4 Stunden nach Abnahme), bitte diese in das beiliegende Kuvert zur Rücksendung stecken. **Beachten Sie bitte die beiliegende Anwendungsanleitung zur Abnahme mittels Trockenblutkarte.**
- Bitte den Anforderungsschein ausfüllen und unterschreiben (ÄrztIn und PatientIn).
- Bitte die Einverständniserklärung nach Gendiagnostikgesetz unterschreiben (PatientIn).
- Bitte das Kuvert mit Trockenblutkarte, ausgefülltem Anforderungsschein und Einverständniserklärung nach Gendiagnostikgesetz innerhalb weniger Tage versenden. Das Rücksendekuvert ist bereits frankiert – keine Briefmarke notwendig.

Checkliste Versand

Bitte beachten Sie folgendes bei der Rücksendung:

- ✓ Vollständig unterschriebener **Anforderungsschein und Einverständniserklärung**
- ✓ **Versand:**
Möglichkeit A Nutzen Sie den amedes Kurier, wenn eine Anbindung bereits vorhanden ist. Adresse für das aescuLabor Hamburg:
[aescuLabor Hamburg GmbH](#)
z. Hd. Probenannahme
[Haferweg 36](#)
[22769 Hamburg](#)
Möglichkeit B Nutzen Sie den Versand über die deutsche Post.